



3M LITTMANN® CORE

Stetoscopio digitale progettato per amplificare i rumori cardiaci, polmonari e di altre parti del corpo.



Littmann®
Stethoscopes



Il nuovo stetoscopio digitale 3M™ Littmann® CORE offre l'acustica eccezionale, il confort e la qualità di uno stetoscopio Littmann® Cardiology IV, ai quali si aggiunge il potente attacco digitale CORE.



INDICAZIONE D'USO

Destinato per uso professionale e clinico su pazienti pediatrici e adulti.

CONTENUTO CONFEZIONE

Fornito con cavo USB, olive morbide conformabili di ricambio, ghiera antifreddo, manuale d'uso multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, HU, DK, SE, NO.



DISPONIBILE IN:

- Colore nero
- Colore nero finiture arcobaleno
- Colore nero finiture in rame
- Colore nero finiture specchio

• Connessione al software Eko via Bluetooth

È possibile connettersi facilmente al software Eko tramite Bluetooth. Il software consente di catturare registrazioni di 15, 30, 60 o 120 secondi, visualizzare le onde sonore cardiache in tempo reale, analizzare e condividere registrazioni per monitorare la progressione di una malattia. La App Eko è disponibile per dispositivi iOS e Android.

• Cancellazione attiva del rumore

Riduce i suoni indesiderati di sottofondo, consentendo un'auscultazione più affidabile

• Doppia modalità di auscultazione

Passaggio dalla modalità analogica a quella amplificata tramite la pressione di un bottone sul dispositivo.

• Utilizzabile con pazienti adulti e pediatrici

Grazie alle due membrane flottanti è possibile udire suoni ad alta e bassa frequenza semplicemente regolando la pressione sulla testina

• Amplificazione fino a 40x

In base al confronto tra ascolto analogico e ascolto amplificato elettronicamente con volume massimo alla frequenza di picco (125 Hz). Volume regolabile con i pulsanti sul lato CORE.

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Dimensioni: 3,3 cm (1,3 pollici), 4,3 cm (1,7 pollici)	Testina: a due facce
Lunghezza totale: 69 cm	Peso: netto: 232 g / testina: 87 g
Materiale: resina eposs./fibra vetro	Spegnimento automatico: 5 min.
Membrana: fluttuante	Alimentazione: batteria ricaricabile

Tempo funzionamento: 8 ore di trasmissione continua con batteria completamente carica

CARATTERISTICHE:

- Testina a doppia faccia in acciaio inox con membrana fluttuante e con campana aperta o chiusa;
- Testina rotante per adulti e per bambini;
- Le olive morbide conformabili aderiscono alle orecchie, fornendo un ottimo isolamento acustico e confort;
- La batteria completamente carica dura 8 ore in modalità di trasmissione continua;
- 3 filtri selezionabili: cardiaco, polmonare e ampio;
- 7 livelli di amplificazione del suono;
- Rilevazione soffio cardiaco, tachicardia e bradicardia.

Seguici anche su:



The logo for Eumaco Health Care Systems, featuring a stylized blue and red wave graphic to the left of the company name.

Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it