

A close-up photograph of a person's hands holding a small, black, rectangular device. The device has a white arrow pointing to the right. The background is a blurred, blue-tinted image of a person's torso and arms. A dark blue horizontal band is overlaid on the image, containing the text.

QUÆVER

# KardiaMobile 6L

Manuale d'uso

# **Manuale d'uso**

## **KardiaMobile 6L**


<b>Cos'è Kardia Mobile 6L</b>	<b>3</b>
<b>Prima attivazione e registrazione</b>	<b>4</b>
<b>Registrazione di un ECG a 1 derivazione</b>	<b>5</b>
<b>Registrazione di un ECG a 6 derivazioni</b>	<b>7</b>
<b>Interpretazione e condivisione dell'ECG</b>	<b>9</b>
<b>Consigli di utilizzo</b>	<b>11</b>
<b>Assistenza</b>	<b>12</b>

# Che cos'è Kardia Mobile 6L

Kardia è l'elettrocardiografo tascabile a 6 derivazioni più piccolo e preciso al mondo.

Consente di registrare un ECG in qualsiasi momento, ovunque, e condividerlo con il proprio medico di fiducia.

E' un dispositivo medico certificato di classe II A, FDA-cleared, marchiato CE, che consente di fare diagnosi, screening e monitoraggio delle aritmie cardiache.

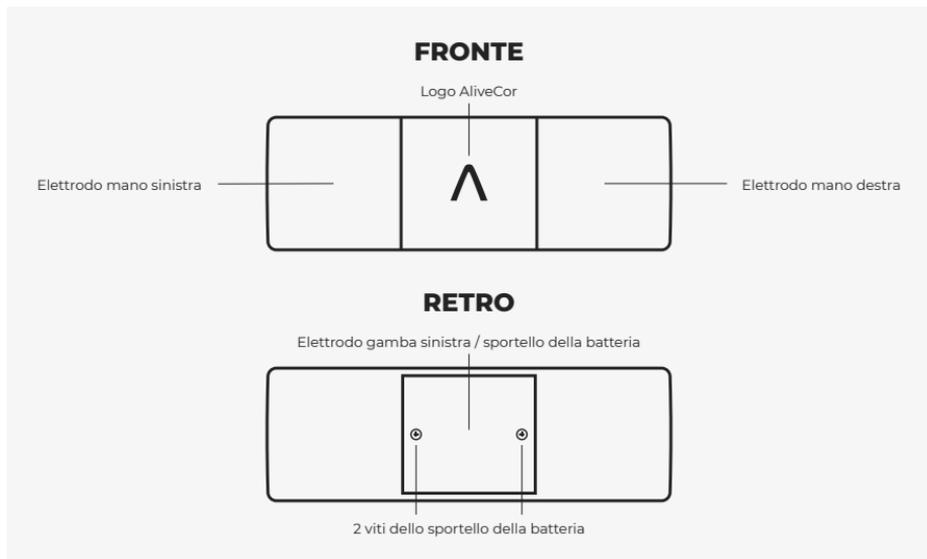

# Prima attivazione e registrazione

1

Rimuovere il dispositivo KardiaMobile 6L dalla confezione.

---

2

Scaricare l'app gratuita Kardia  dall'App Store o da Google Play. Kardia 6L è compatibile con la maggior parte degli smartphone o tablet Apple e Android. Se si riesce a scaricare l'App, il dispositivo è compatibile. L'elenco aggiornato dei dispositivi compatibili è disponibile su [www.alivecor.com/compatibility](http://www.alivecor.com/compatibility) .

---

3

Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato nelle impostazioni dello smartphone o del tablet. Avviare l'app Kardia e cliccare su "Crea account" per creare il proprio profilo, seguendo il percorso di registrazione guidata.



# Registrazione di un ECG a 1 derivazione

D1 (mano destra - mano sinistra)

**1**

Aprire l'app e toccare “Registra il tuo ECG”.

---

**2**

Se è la prima volta che si utilizza KardiaMobile 6L, seguire le istruzioni su schermo per configurare e associare il dispositivo in uso.

---

**3**

Selezionare l'opzione “ECG a derivazione singola” dal menu in basso.

---



**4**

Appoggiare il dispositivo su una superficie piana vicino allo smartphone o tablet, e assicurarsi che il dispositivo sia orientato correttamente con la “A” di AliveCor rivolta verso di sé.



## 5

Posizionare due dita di ciascuna mano su ognuno dei due elettrodi superiori, senza premere eccessivamente. L'app indicherà quando il contatto è ottimale.

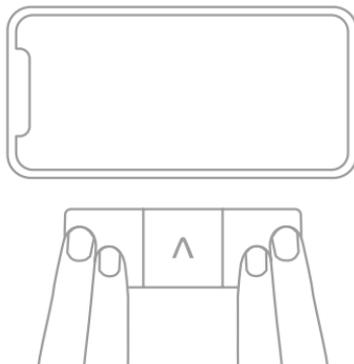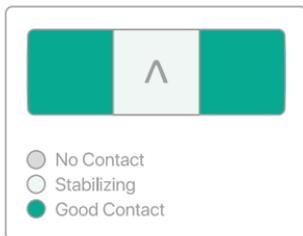

## 6

Tenere le dita appoggiate per tutta la durata della registrazione, impostabile da 30 secondi a 5 minuti (il conto alla rovescia è indicato dal timer)



# Registrazione di un ECG a 6 derivazioni

D1, D2, D3, aVL, aVf, aVr (mano destra - mano sinistra - gamba sinistra)

**1**

Aprire l'app e toccare “Registra il tuo ECG”.

---

**2**

Se è la prima volta che si utilizza KardiaMobile 6L, seguire le istruzioni su schermo per configurare e associare il dispositivo in uso.

---


**3**

Selezionare l'opzione “ECG a sei derivazioni”.

---

**4**

Appoggiare i pollici su i due elettrodi superiori, senza premere eccessivamente. Assicurarsi che il dispositivo sia orientato correttamente con la “A” di AliveCor rivolta verso di sé.

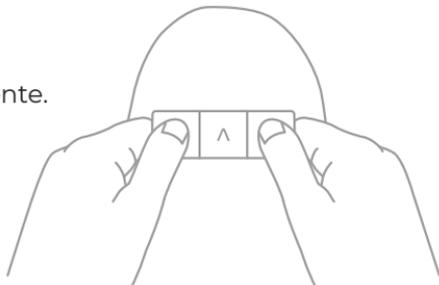


## 5

Tenendo i pollici appoggiati sui due elettrodi superiori, posizionare il dispositivo ECG sulla pelle nuda della gamba sinistra (ginocchio o interno della caviglia).

L'elettrodo inferiore deve entrare in contatto con la pelle.

L'app indicherà quando il contatto è ottimale.

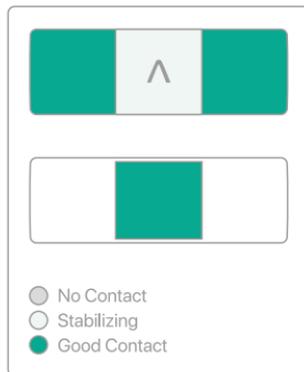

## 6

Mantenere la posizione mentre si guarda il conto alla rovescia del timer, fino a quando la registrazione ECG non sarà completata.



# Interpretazione e condivisione dell'ECG

Al termine della registrazione, la App fa un'**analisi immediata dell'ECG** segnalando la presenza di anomalie del ritmo e della frequenza, come la fibrillazione atriale.

---

Il tracciato può poi essere facilmente stampato o condiviso **in formato PDF con il proprio medico** di fiducia, cliccando sul simbolo della busta e scegliendo se inviarlo via email, whatsapp, Drive o altro.

---

La App vi chiederà se vorrete proteggere il vostro ECG con una password, e in tal caso ricordatevi di comunicarla anche al vostro medico, ma noi solitamente suggeriamo di scegliere "salta".

---

Al tracciato si possono poi associare note personali, ad esempio sintomi o sensazioni personali.

---

**Tutti gli elettrocardiogrammi registrati rimangono sempre salvati nella sezione "cronologia" dell'App.**

E' possibile usare Kardia su **più smartphone o tablet**, semplicemente installando la App sui dispositivi ed accedendo con nome utente e password.

---

E' sempre possibile fare un elettrocardiogramma a **più persone** (es. tutta la famiglia o pazienti diversi), semplicemente attendendo la fine della registrazione dell'ECG e scegliendo la modalità "ospite". I dati della persona saranno così associati al suo ECG e inclusi nel PDF.



# Consigli di utilizzo

## Durata registrazione

Durante i primi 10 secondi di registrazione potrebbero essere visibili numerosi artefatti della traccia, successivamente la traccia si stabilizzerà; si suggerisce di impostare il tempo della registrazione ad almeno 1 minuto.

---

## Corretta registrazione del tracciato

Se il tracciato non è “pulito”, suggeriamo di inumidire (con acqua o alcool) la porzione di gamba dove si desidera appoggiare il KardiaMobile 6L e le dita di entrambe le mani.

Mantenere una posizione comoda e rilassata, senza premere eccessivamente sul dispositivo.

---

## Cambio batteria - [Guarda il video su Youtube](#)

Quando l'applicazione Kardia segnalerà che la batteria è scarica sarà necessario sostituirla.

Per sostituire la batteria (modello CR2016) occorre svitare le due viti presenti sul lato dell'elettrodo posteriore, sollevare la placca grigia e sfilare la vecchia batteria.

Una volta sostituita la batteria, avvitare l'elettrodo assicurandosi che sia fermo.

# Assistenza

## Garanzia

Kardia è in garanzia per 2 anni dalla data di acquisto, e in caso di malfunzionamento provvederemo alla sua sostituzione

---

## Pulizia e disinfezione

Per pulire o disinfettare Kardia, passare delicatamente sugli elettrodi un panno morbido inumidito con acqua e sapone, soluzioni alcoliche o salviette umidificate. Assicurarsi di asciugare adeguatamente il dispositivo.

---

Consigliamo di guardare le Videoguide sul nostro [canale Youtube "Quiver Italia"](#), e consultare le risposte alle principali domande su [www.quiver.store/supporto](http://www.quiver.store/supporto).

Siamo a disposizione per assistervi in qualsiasi passaggio; potete [scriverci su Whatsapp](#), Scriverci su Signal, chiamarci al [3936609248](tel:3936609248) o parlare in diretta con noi su [www.quiver.store](http://www.quiver.store).



[www.quiver.store](http://www.quiver.store) 



Videoguide sul Kardia   
[Quiver Italia](#)



Promozioni e novità dal mondo Quiver   
[@quiveritalia](#)



Scopri di più su di noi   
[@quiver\\_italia](#)

# Q U Æ V E R

## ASSISTENZA TECNICA

 [assistenza@quiver.store](mailto:assistenza@quiver.store) 

 393 6609248 

 393 6609248 

 393 6609248

 [www.quiver.store](http://www.quiver.store) 

## INFORMAZIONI

 [info@quiver.store](mailto:info@quiver.store) 

## CONTATTI COMMERCIALI

 [info@quiver.store](mailto:info@quiver.store) 

 366 3634835 